

PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTÁNDAR (POE)

Control de Drogas en Saliva

Policía Local y Empresas

1. OBJETO

Establecer el procedimiento oficial para la detección indiciaria de drogas de abuso en saliva mediante el Analizador Profesional CDP WDTP-10, garantizando seguridad jurídica, trazabilidad y homogeneidad operativa.

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN

Aplicable a Policía Local, empresas privadas, transporte profesional, flotas, seguridad y prevención de riesgos laborales.

3. MARCO NORMATIVO

Ley de Seguridad Vial, protocolos oficiales de control de drogas en España, normativa interna de cada organismo y principios de cadena de custodia.

4. EQUIPAMIENTO

- Analizador de Drogas CDP WDTP-10
- Test saliva UNOW Multidrogas (7 paneles)
- Recolector de saliva QiDix™
- Guantes desechables
- Formularios o sistema digital de registro

5. RESPONSABILIDADES

Operador: ejecución correcta del test y registro.

Supervisor: custodia documental y coordinación de confirmaciones.

6. INFORMACIÓN PREVIA AL SUJETO

El sujeto será informado del carácter obligatorio de la prueba, su naturaleza indiciaria y las consecuencias de un resultado positivo o negativa a someterse.

7. PROCEDIMIENTO OPERATIVO

- 7.1 Preparación del material.
- 7.2 Toma de muestra con QiDix™.
- 7.3 Preparación del test UNOW.
- 7.4 Análisis automático con CDP WDTP-10.
- 7.5 Registro del resultado.

8. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

NEGATIVO: El sujeto puede continuar la actividad.

POSITIVO: Retirada preventiva y activación de prueba confirmatoria.

9. OBSERVACIÓN DE SIGNOS EXTERNOS

Registro de nerviosismo, temblores, sudoración, desorientación u otros signos compatibles.

10. CADENA DE CUSTODIA

Sellado, etiquetado, registro y envío de muestras a laboratorio acreditado si procede.

11. PROTECCIÓN DE DATOS

Tratamiento de datos conforme RGPD y normativa interna.

12. LIMITACIONES

El sistema es de cribado indiciario; la confirmación definitiva corresponde a laboratorio acreditado.

ANEXO I – FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO

