

# Manual de instrucciones

## Analizador de drogas

### MODELO: WDTP-10



El usuario debe leer el manual de instrucciones y estar familiarizado con las funciones antes del uso. Guarde el manual para futura referencia.

COMERCIALIZADO EN EXCLUSIVA POR:



CONSUMER  
DESIGN  
PRODUCTS

C.D.PRODUCTS S.A.


Polígono P-29, Calle Kappa, 2 – Local 3

28400 Collado Villalba – Madrid

Teléfono de Atención al Cliente: 902 10 40 60

E – mail de contacto: [clientes@cdproducts-spain.com](mailto:clientes@cdproducts-spain.com)

## VISTA EXTERIOR

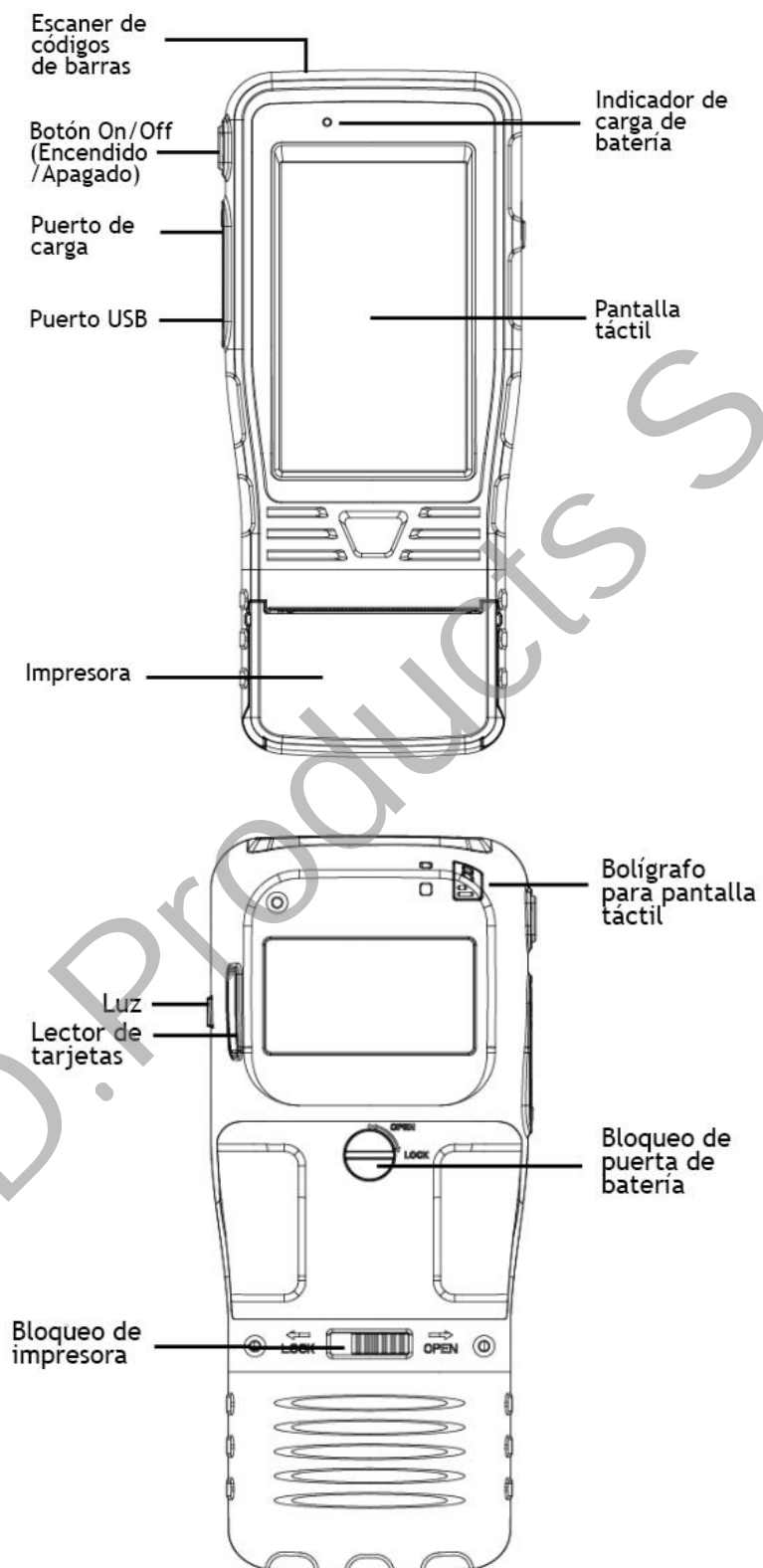

COMERCIALIZADO EN EXCLUSIVA POR:



CONSUMER  
DESIGN  
PRODUCTS

C.D.PRODUCTS S.A.

Polígono P-29, Calle Kanna, 2 – Local 3

28400 Collado Villalba – Madrid

Teléfono de Atención al Cliente: 902 10 40 60

E – mail de contacto: clientes@cdproducts-spain.com

## INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

### Test

1. Tenga puestos un par de guantes para realizar la comprobación.
2. Abra un paquete de test nuevo, retire el cartucho de test y el colector de muestras.




3. Encienda el dispositivo.
4. Presione el icono "Test" para comenzar un nuevo test.



5. Introduzca la información para el test.
  - a. Los campos vacíos no aparecerán en la impresión.

6. Escanee la etiqueta de código de barras del cartucho de test.

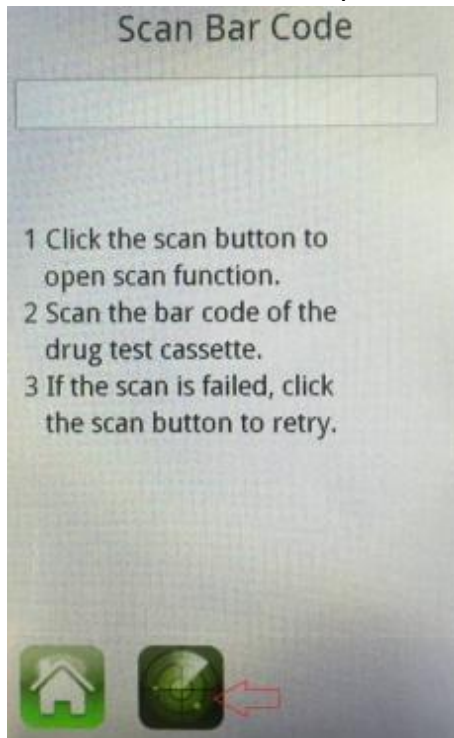

(Imagen izquierda)  
Escanear código de barras

1. Haga clic en el botón Scan para abrir las funciones de escaneo.
2. Escanee el código de barras del colector de muestras de drogas.
3. Si el escaneo fallase, haga clic en el botón Scan para volver a intentar.



7. Se mostrarán los detalles del cartucho de test. Presione la flecha para continuar.

	<p>1. Use the sample collector to collect saliva sample for 3 minutes and until the colour indicator on the sample collector sponge changes to red.</p> <p>2. Insert the sample collector into the cassette, twist the collector until it locks in place.</p> <p>3. After the control lines show, insert the cassette into the device. It takes a few minutes for the test result to be stabilized.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Use el colector de muestras para recoger muestras de saliva durante 3 minutos y hasta que el indicador de color de la esponja del colector de muestras cambie a rojo.</li> <li>2. Inserte el colector de muestras en el cartucho, gire el colector hasta que se ajuste en el sitio.</li> <li>3. Una vez las líneas de control se muestren, inserte el cartucho en el dispositivo. Tomará pocos minutos que el resultado se estabilice.</li> </ol>
--	---	---

8. Sitúe la esponja del colector de muestras en la boca de la persona a comprobar, asegúrese de que se limpia dentro de la boca de la persona, dentro de las mejillas, cavidades y superficie de la lengua, y entonces sitúe la esponja bajo la lengua. Déjela en la boca durante 3 minutos y hasta que el indicador de color de la esponja del colector de muestras cambia a rojo.



9. Inserte el colector de muestras dentro del cartucho de test tal como se muestra en la imagen inferior; gire el colector de muestras hasta que quede asegurado en su sitio.




10. Espere hasta que se muestren las líneas de control; inserte el colector en el dispositivo.




11. Una vez el colector está insertado, el dispositivo comenzará a leer los resultados. Llevará varios minutos para que el resultado del test se estabilice, por favor espere (presione el botón *Skip* ("Saltar") para mostrar el resultado inmediatamente, aunque esto NO está recomendado). Una vez el resultado sea estable, llevará unos pocos segundos confirmar el resultado.


**Estabilizando resultado del test**

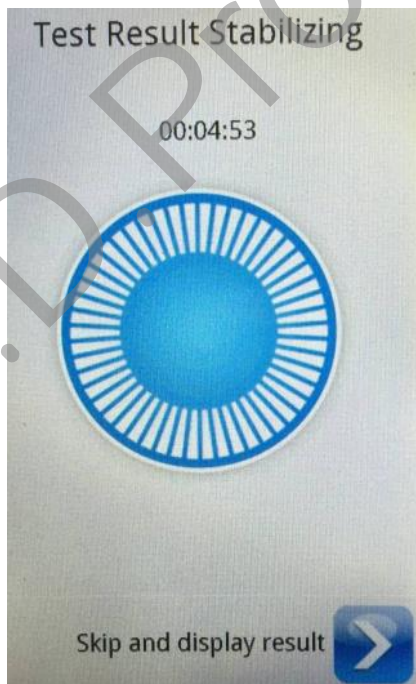

**Confirmando resultado del test**

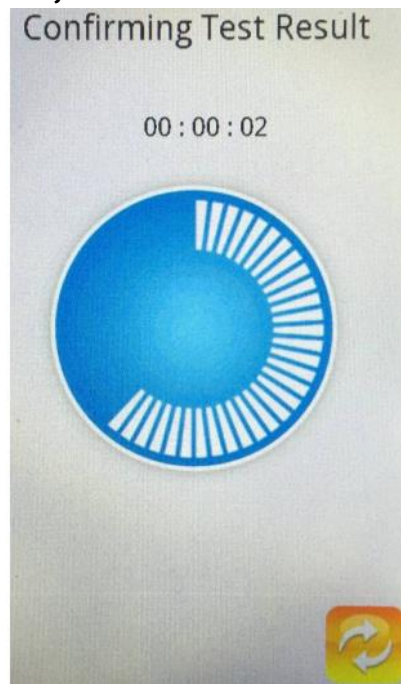


12. Los resultados se mostrarán en la pantalla. Presione la flecha para continuar.

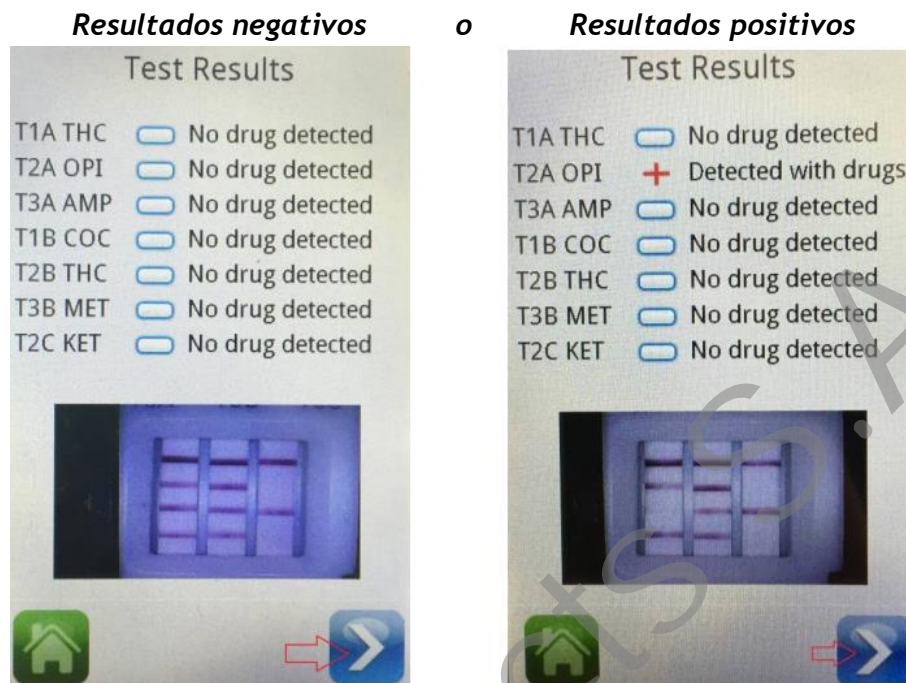


13. Si se detectan drogas, por favor realice las gestiones necesarias para un test en laboratorio.

14. Si el colector de test no funcionase o las líneas de control no se mostrasen, el test es "Invalid" ("No válido"). Repita el test con un nuevo colector de muestras.

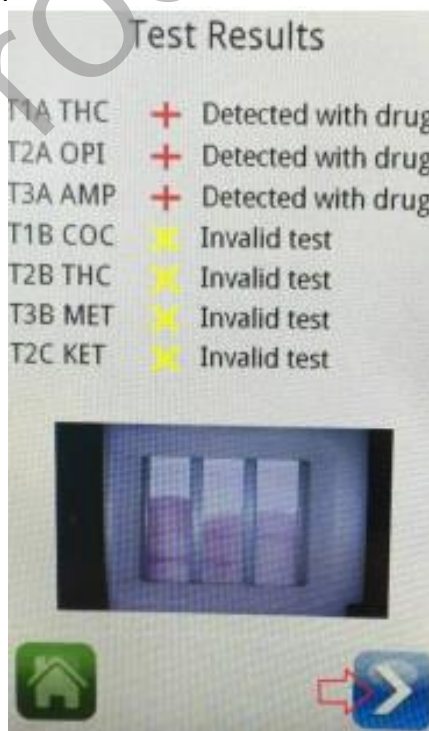

15. Si apareciese el mensaje de error “*Calibration error*” (“*Error de calibración*”) en la pantalla, por favor acuda a la función “*Verification*” (“*Verificación*”).

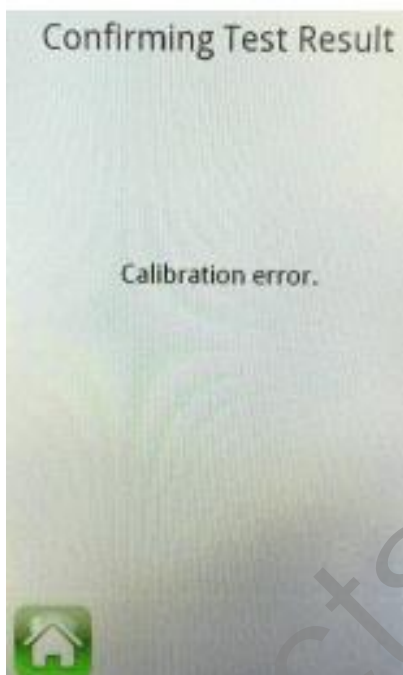


16. Imprima el registro del test si fuese necesario.  
a. Los campos vacíos no aparecerán en la impresión.



## Funciones

1. Presione el icono “Function” (“Funciones”) para entrar en el ajuste de funciones.

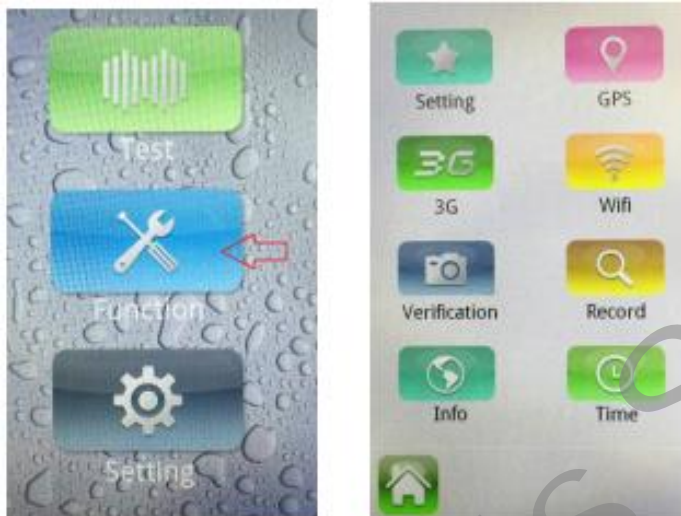

### Setting (“Ajustes”)

Para ajustar el nivel de luz de la pantalla, el temporizador para estabilizar el resultado, el temporizador de apagado automático de la luz de la pantalla y el temporizador de apagado automático.



### GPS

1. Se mostrará la longitud y latitud de la localización del dispositivo.
2. Se guardará e imprimirá la longitud y latitud del test.

NOTA: El sistema GPS sólo funcionará durante 5-10 minutos después de apagar el dispositivo. Sólo puede recibir señal en un área abierta. Si no hubiera señal GPS, la longitud y la latitud no se mostrarán en la impresión.



### 3G

Ajustes de conexión 3G.



### Wifi

Ajustes de conexión Wifi.





### Verification (“Verificación”)

Si la cámara no funcionase o no pudiese enfocar correctamente en el cartucho de test, o apareciese un mensaje de error, inserte el cartucho de test y entre al ajuste de verificación para ajustar la cámara. Simplemente presione el botón “Verification” y entonces inserte un cartucho de test.



### Record (“Registro”)

1. Se pueden guardar más de 100.000 registros de tests con la foto de las personas comprobadas.
2. Seleccione el registro y vea los detalles del registro del test. El registro de test individual puede imprimirse.
3. Presione  para buscar registros de test mediante campos y presione  para confirmar.



### Info

Para comprobar la versión del software del dispositivo.



### Time (“Tiempo”)

Ajuste de fecha y hora.

## Configuración avanzada



Únicamente se permite a personas autorizadas con contraseña entrar a la configuración avanzada. Por favor consulte las instrucciones de configuración avanzada.

## Impresora

Una impresora térmica acoplable se utiliza para el dispositivo.

### INSERTAR PAPEL

Tire del asa para abrir el cartucho de la impresora e inserte papel térmico. Al insertar un nuevo rollo de papel asegúrese de que la parte brillante se mantiene cerca de la parte dentada.

NOTA: Si no se puede imprimir nada, cambie el papel de lado y vuelva a intentar.

### TAMAÑO ESTÁNDAR DE PAPEL TÉRMICO

6 cm X 500 cm